

TSM vet-Reha Pferd

Anlegen der TSM vet-Reha Fesselkopf-Bandage

Bild 1



Bild 2



Bild 1 Bandage von hinten (rote Innenstruktur der Bandage zeigt dabei nach innen) um das Gelenk legen, wobei die Beugesehne in der Mitte zwischen den beiden links und rechts verlaufenden Nähten liegt.

Zunächst mittleren Klettverschluss mit guter Kompression fixieren, dann mit unterem und oberem Klettverschluss in gleicher Weise verfahren

Bild 2 Innen- und außenliegenden Gurt mit festem gleichmäßigem Zug um das Gelenk nach oben führen und auf dem jeweilig zugehörigen Klettverschluss fixieren.



Bild 3



Bild 4

Bild 3 Innenliegenden Gurt nach oben außen und zirkulär nach innen auf dem schwarzen Klettverschluss straff fixieren, dann in gleicher Weise der außenliegenden Gurt befestigen.

Das Gurtkreuz liegt knapp oberhalb des Fesselgelenks.

Bild 4 Zum Schluß wird der außenliegende Gurt am Klettverschluss des Innengurtes fixiert. Je stärker der Zug bis zum ersten Klettverschluss ist, desto höher ist die Entlastung der Oberflächen Beugesehne und des Fesselträgers.